


Proces aplikácie

Udržujte indikátory v teple

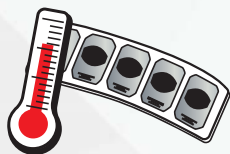

Miesto aplikácie



Starostlivo vykefujte



Očistite chlpy



Aplikácia indikátora pripúšťania



Skontrolujte výsledky

Pripúšťajte



Nepripúšťajte



Dostupné v piatich farbách



Čítanie výsledkov

S novou technológiou Breeding Bullseye je prečítanie výsledkom jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Pri vyskakovaní kráv dochádza k zošúchavaniu strieborného a čierneho povrchu nálepky ESTROTECT a objavuje sa indikátor vybranej farby.

Ak je správne aplikovaný, strieborný a čierny povrch sa postupne zošúcháva - ako následok vyskakovania a to je znak, že krava prichádza do ruje. Akonáhle je Býčie oko alebo ekvivalentná časť povrchu zošúchaná, zvierat je na vrchole ruje a malo by sa pripúšťať.

Farba indikátora by mala byť veľmi jasná a lesklá. V mimoriadne stresujúcich podmienkach s veľkou hustotou zvierat a/alebo horúcim prostredím môže byť farba indikátora menej výrazná, pretože kravy nemajú takú tendenciu vyskakovať.



www.sbsas.sk

sbs@sbsas.sk

ESTROTECT™
BREEDING INDICATOR

Dairymac
Animal Health Products
INNOVATION · QUALITY · VALUE

AS GOOD AS A BULL™
TAKÝ DOBRÝ AKO BÝK

www.ESTROTECT.com

ESTROTECT™
BREEDING INDICATOR



Úspešné pripúšťanie
s novou technológiou
BULLSEYE™

Ešte lepšie s Býčím okom (Breeding Bullseye)

ESTROTECT Indikátory pripúšťania sú teraz lepšie ako kedykoľvek predtým s patentovanou technológiou Breeding Bullseye. ESTROTECT indikátory sú ultra efektívne pri identifikácii kráv v ruji a správnom načasovaní pripúšťacích protokolov.

ESTROTECT indikátory pripúšťania neslúžia len na detekciu ruje. Býčie oko Vám teraz napovie kedy je krava v ruji a s mimoriadnou presnosťou kedy by mala byť pripustená, tak aby ste dosiahli optimálne výsledky. Jednoducho povedané, keď je Býčie oko, alebo ekvivalentná časť povrchu, zošúchané - je čas pripúšťať!

Ako nikdy predtým, chovatelia a reprodukční špecialisti môžu využívať

ESTROTECT indikátory rôznymi spôsobmi vo svojich programoch riadenia reprodukcie na zlepšenie ich kvality a efektivity.

Možnosti využitia:

INSEMINÁCIA

- zistenie optimálneho času na pripúšťanie pri načasovanej inseminácii
- určenie vrcholu ruje pri štandardnom pripúšťaní

SYNCHRONIZAČNÉ PROTOKOLY

- indikátor kontroly kvality pre reprodukčných špecialistov
- presné načasovanie výkonu inseminácie



Overené výsledky

Ruja	Typ ID	ESTROTECT skóre zošúchania (0 = bez zmeny, 1 = 50% zmena farby, 2 = > 50% zmena farby, 3 = úplne zošúchaný povrch)				
			0	1	2	3
Acyklická	Konvenčná	% PODIEL TELNÝCH PO INSEMINÁCIÍ	18.4 (18/98)	21.1 (12/57)	56.7 (56/99)	61.9 (13/21)
Cyklická	Konvenčná		44.2 (57/129)	48.3 (43/89)	66.9 (239/357)	59.8 (55/92)
Cyklická	Sexovaná		29.3 (34/116)	25.8 (24/93)	56.7 (207/365)	56.6 (51/90)
Celkom [% (n)%]			31.8 ^a (109/343)	33.1 ^a (79/239)	61.1 ^b (502/821)	58.6 ^b (119/203)

ESTROTECT indikátory sú jediný produkt svojho druhu odskúšaný špičkovými odborníkmi. ESTROTECT indikátory boli vyvinuté a testované na tisíckach kráv na celom svete. Podľa výskumu z roku 2018 na mäsovom dobytku, pri použití ESTROTECT indikátorov bola teľnosť 3x pravdepodobnejšia ako pri inseminácii bez detekcie ruje.